

Formularul de testare rapidă a cazului suspect de COVID-19

Anexa 1

Tip investigație solicitată:

detectie SARS-CoV-2 prin test antigenic rapid

Unitatea Școlară: _____

Clasa: _____

Probă caz suspect COVID-19

Nume: _____ Prenume: _____

Adresa de reizență: _____

Localitate: _____ Județul: _____

CNP: _____ Vârștă: _____ ani

Număr telefon mobil: _____

Data recoltării probei: __ / __ / _____

Ora recoltării probei: __ : __

Tipul probei relevate: exudat nazal/exudat faringian

Rezultat: _____

Recoltat/Întocmit: _____

Important:

- formularul se va completa **cu majuscule**
- persoana care completează datele în prezentul formular **își asumă corectitudinea** introducerii corecte a datelor.



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII

Machetă model pentru raportarea la DSP a rezultatelor testelor rapide antigenice

Anexa 2

Rezultat Rapid pozitiv/ Rapid negativ	Data recoltării	Tip_probă	Proba dispusă	CNP	Nume	Prenume	E-mail	Cod județ	Solicitant probă	Personal medical	Nr. telefon

Macheta va fi completată încărcată în format **.csv** în aplicația Corona Forms.



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII

Instrucțiuni de utilizare a testelor rapide AG pentru COVID-19

Anexa 3

Kitul de testare rapidă conține:

- Instrucțiuni de utilizare
- Casete sterile de testare
- Tampon steril pentru recoltarea exudatului
- Recipient(tub) de unică utilizare cu picurator și soluție de testare, sau
- Soluție de testare (unii producători livrează recipientii pregătiți cu soluție, alții livrează soluția în recipienti separați)


Modul de recoltare. Pașii care trebuie urmați:

1. Echiparea personalului care recoltează. Echipamentul de lucru este compus din mască, halat de unică utilizare, viziera (sau ochelari de protecție), mănuși de examinare.
 2. Se desface capacul recipientului de unică utilizare și se așează în suport. Dacă recipientul nu conține soluție de testare se adaugă 10 picături
 3. Se desigilează tamponul steril și se introduce cu grijă în cavitatea nazala până în rinofaringe (betigasul tamponului prezintă de regulă un marcaj).Tamponul se rotește cu blândețe de 1-2 ori și apoi se scoate.
 4. Se introduce tamponul cu proba în recipientul cu soluția de testare și se rotește de 5 ori.
 5. Se atașează picuratorul la tub.
 6. Se desigilează testul și se adaugă 3 picături în zona dedicată (aflată în partea de jos a casetei).
 7. Rezultatul se interpretează după 10-15 minute.
- ATENȚIE: dacă se depășesc 30 de minute, rezultatul poate fi eronat.

INTERPRETAREA REZULTATULUI:

Corectitudinea recoltării este confirmată prin linia de control C. Dacă această linie nu este evidențiată testul este invalid.

Dacă pe grilă casetei apare evidențiată doar linia de control C, testul este negativ. Rezultatul este pozitiv dacă pe grilă de control sunt evidențiate ambele linii (control C și test T)

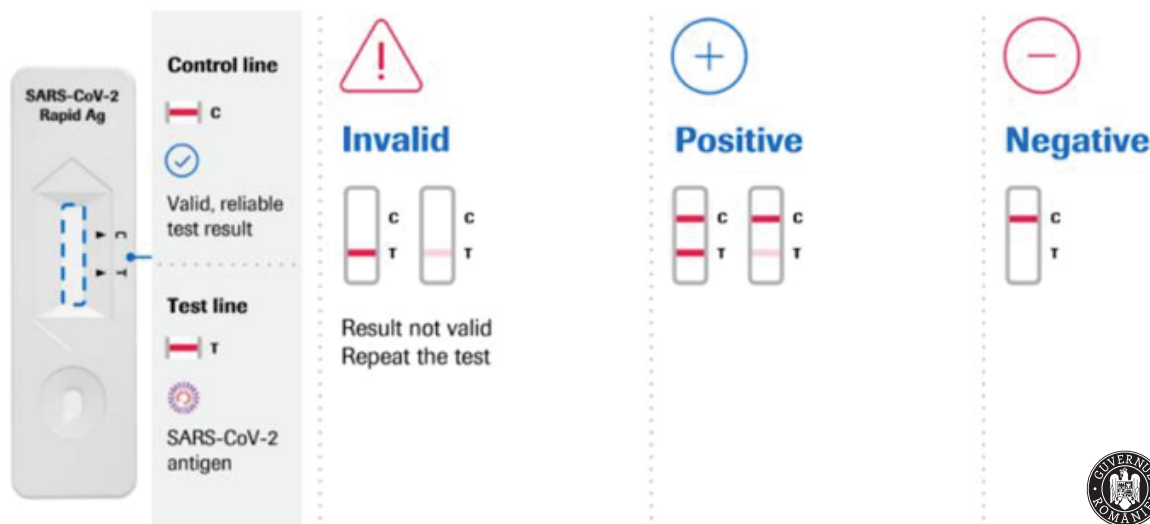

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII